

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/acerbi-sprawdz-kleszcza-test-plytkowy-p-148438.html>



## ACERBI Sprawdź Kleszcza-Test Płytkowy

Cena	<b>42,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>5903714964000</b>
Kod producenta	<b>5903714964000</b>

### Opis produktu

#### ACERBI Sprawdź Kleszcza-Test Płytkowy - Opis Produktu

Test do wykrywania bakterii boreliozy u kleszczy #Sprawdz kleszcza to test diagnostyczny do samodzielnego wykonania w domu, który umożliwia ocenę, czy usunięty z ciała kleszcz jest nosicielem bakterii boreliozy.

Produkt przeznaczony do samodzielnego wykrywania bakterii B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmannii u kleszczy usuniętych z ciała ludzi lub zwierząt.

Test #Sprawdz kleszcza jest łatwy i szybki w wykonaniu, wynik otrzymuje się już po 10 minutach.

Czułość testu: 92,86%

Specyficzność testu: 95,83%

#### ACERBI Sprawdź Kleszcza-Test Płytkowy - Dane Techniczne

- W opakowaniu znajduje się: test płytkowy, pipeta, drewniany patyczek, probówka, butelka z odczynnikiem oraz instrukcja obsługi.

#### Dodatkowe Informacje

Sposób użycia:

Wymij test z foliowego opakowania, przygotuj pozostałe elementy niezbędne do jego przeprowadzenia. Ostrożnie usuń kleszcza i zdezynfekuj miejsce po ugryzieniu. Upewnij się, że został on usunięty w całości. Oceń wielkość kleszcza i dobierz odpowiednią procedurę wykonania testu.

Małe i średnie kleszcze (< 8 mm):

Umieść kleszcza w probówce i dodaj 3 krople odczynnika.

Rozgnieć kleszcza za pomocą ostrej strony patyczka, rozgniataj go aż do odbarwienia się płynu.

Za pomocą pipety pobierz płyn (bez cząstek kleszcza) i nanieś 3 krople na dołek na płytce.

Odczekaj 10 minut i sprawdź wynik.

Duże kleszcze (> 8 mm):

Umieść kleszcza w probówce.

Zmiażdż kleszcza za pomocą ostrej strony patyczka.

Za pomocą pipety pobierz powstały płyn (bez cząstek kleszcza) i nanieś 1 kroplę na dołek na płytce.

Odczekaj kilka sekund i nanieś na dołek 2 krople odczynnika.

Odczekaj 10 minut i sprawdź wynik.

Obecność barwnego paska w polu kontrolnym C i w polu testowym T oznacza wynik pozytywny - w próbce wykryto obecność bakterii boreliozy, należy pilnie skontaktować się z lekarzem, gdyż mogło dojść do zarażenia.

Obecność barwnego paska w polu kontrolnym C i jego brak w polu testowym T wskazuje na wynik negatywny.

Brak barwnego paska w polu kontrolnym C oznacza iż test jest nieprawidłowy - należy wykonać nowy test.

---

Mimo uzyskania wyniku negatywnego należy pamiętać, że kleszcze przenoszą także inne choroby. W przypadku wystąpienia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Produkt jednorazowego użytku, nie należy ponownie wykorzystywać żadnego z elementów zestawu.

Kasetkę należy zużyć w ciągu 1 godziny od jej otwarcia.

Nie stosować jeśli torebka foliowa uległa uszkodzeniu lub minął termin ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 2-30°C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, nie zamrażać.