

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/alavis-hemagel-7g-p-149873.html>

## ALAVIS Hemagel 7g



Cena	<b>62,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>8594191410226</b>
Kod producenta	<b>8594191410226</b>
Specjalna potrzeba	<b>Gojenie ran</b>
Faza życia	<b>Bez ograniczeń producenta</b>
Specjalna potrzeba(filtry)	<b>Rany</b>
Waga	<b>7</b>

### Opis produktu

#### ALAVIS Hemagel 7g - Opis Produktu

Żel hydrofilowy wspomagający gojenie się ran. ALAVIS Hemagel jest odpowiedni dla dużych i małych zwierząt domowych lub zwierząt egzotycznych.

Unikalne składniki produktu wiążą się chemicznie z wolnymi rodnikami tlenowymi powstającymi w procesach zapalnych, przyspieszają proces gojenia się ran, zmniejszają ryzyko skomplikowanego gojenia i tłumią ból rany. Produkt tworzy warstwę powierzchniową, która działa jak druga skóra, pomagając chronić ją przed wpływami zewnętrznymi i tworząc sprzyjające środowisko do gojenia się ran ostrych lub przewlekłych (np. pooperacyjnych lub innych uszkodzeń skóry). Wilgotne środowisko podczas gojenia się ran jest nowoczesną i podstawową zasadą leczenia. Stabilny poziom nawilżenia w ranie zapobiega powstawaniu strupów, przyspieszając proces gojenia.

#### ALAVIS Hemagel 7g - Dane Techniczne

- Skład: Hydrofilowy żel metakrylanowy na bazie usieciowanego kopolimeru metakrylanu 2-hydroksyetylu zawierającego związane z polimerem sterycznie ekranowane grupy aminowe
- Opakowanie: 7g

#### ALAVIS Hemagel 7g - Sposób Użycia

- Oczyszczyć ranę z zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak drobinki kurzu, resztki poprzednich materiałów medycznych, które mogłyby później podrażnić i uszkodzić ranę
- Otworzyć probówkę przez wstrzyknięcie za pomocą odwróconej zakrętki
- Niewielką ilość żelu nanieść na całą podstawę rany
- Żel przylega do podstawy rany i stopniowo wchłania wydzielinę i inne płyny z rany
- Nakładaj żel w razie potrzeby co najmniej raz na 24 godziny
- Dla większego efektu wskazane jest zakrycie rany sterylnym kwadratem, najlepiej z włókniny
- Materiały mocujące powinny wystawać około 1 cm poza krawędź rany
- Opatrunek wykonać zgodnie z wymaganiami najpóźniej po 24 godzinach, aż problem zniknie w przypadku ran zakażonych zalecamy częstsze zmiany opatrunku
- Aplikacja żelu nie zastępuje podawania antybiotyków w mocno zakażonych ranach
- Działanie żelu objawia się obrzękiem
- Unikalna technologia żelowa zapobiega przywieraniu do rany, a tym samym umożliwia bardzo łatwe usuwanie bez bólu poprzez delikatne przecieranie
- Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii
- Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia

#### Dodatkowe Informacje

Leczy rany łatwo i szybko, zapewniając natychmiastową ulgę.

Leczy drobne urazy i większe rany przewlekłe.

