

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/beaphar-tick-pen-do-latwego-usuwania-kleszczy-p-38925.html>



Beaphar Tick Pen do łatwego usuwania kleszczy

Cena	22,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	mls-17212
Kod EAN	8711231175048

Opis produktu

Tick Pen - Narzędzie do usuwania kleszczy

Tick Pen od Beaphar pozwala w łatwy, bezpieczny i delikatny sposób, usunąć w całości kleszcze przyklepione do skóry.

Kleszcze mogą być nosicielami niebezpiecznych patogenów, wywołujących kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę i babeszjozę psów. Jeśli kleszcz jest ściskany przy nieumiejętnym usuwaniu go, pojawiają się „wymioty” u kleszcza, które zwiększają prawdopodobieństwo zainfekowania żywiciela, gdyż właśnie wtedy treść z patogenami, z wnętrza kleszcza, dostaje się do rany ofiary.

Poręczne narzędzie, które na obu końcach posiada dwa rozmiary szczypiec - do usuwania małych i dużych kleszczy.

Sposób użycia

1. Odsunąć czerwoną osłonę zabezpieczającą końcówkę szczypiec.
2. Ustawić końcówkę szczypiec równoległe do powierzchni skóry w pobliżu kleszcza.
3. Wsunąć szczelinę szczypiec pomiędzy kleszcza a powierzchnię skóry.
4. Ostrożnie unieść szczypcę, usuwając kleszcza.

Należy dokładnie zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.

Zaleca się bacznie obserwować miejsce pokąsania. Jeśli zaobserwuje się zaczerwienienie w kształcie pierścienia wokół tego miejsca, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Polecamy:

W przypadku gdy doszło do pokąsania, możliwe jest sprawdzenie, przy pomocy Beaphar Tick Test, czy atakujący kleszcz jest nosicielem niebezpiecznych bakterii Borrelia. Beaphar Tick Test może być wykorzystany do zbadania kleszczy, które zaatakowały zarówno ludzi jak i zwierzęta.