

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/jm-sante-polisept-vet-protector-oczy-ligo-3ml-p-156577.html>



JM SANTE Polisept Vet Protector Oczy-Ligo 3ml

Cena	86,68 zł
Numer katalogowy	5902596718626
Kod producenta	5902596718626
Kraj dostawcy	Polska
Faza życia	Dorosły, Junior, Kocię, Senior, Szczenięta
Waga gabarytowa w gramach	16618.67
Wysokość towaru w centymetrach	41
Szerokość towaru w centymetrach	38
Długość towaru w centymetrach	64
Kraj pochodzenia	Polska

Opis produktu

Skład: oktan perfluoroheksylu.

VET PROTECTOR OCZY - LIGO 3ml to aktywny opatrunek w formie kropli do oczu VET PROTECTOR OCZY - LIGO 3ml przeznaczony do stosowania w obrębie gałki ocznej u koni, psów i kotów. Preparat zawiera jeden składnik, który posiada niskie napięcie powierzchniowe, co powoduje, że krople natychmiast po aplikacji rozpylają się po całej powierzchni oka przejmując funkcję warstwy lipidowej filmu łzowego. Brak wody w składzie sprawia, że preparat nie posiada pH - dzięki temu nie występuje ryzyko pojawienia się pieczenia po aplikacji. Krople długo utrzymują się na powierzchni oka i zapewniają długotrwałą ochronę.

ZASTOSOWANIE: Krople **VET PROTECTOR OCZY - LIGO 3ml** stosuje się jako opatrunek w przypadku urazów mechanicznych oka, wrzodów rogówki, zapalenia spojówek oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie gałki ocznej.

Do stosowania wspomagająco przy:

- Urazowej i samoistnej erozji rogówki
- Wrzodach rogówki
- Po leczeniu chirurgicznym przepukliny błony Descemeta
- Urazach mechanicznych w obrębie gałki ocznej
- Po zabiegach okulistycznych (chirurgia refrakcji, operacja zaćmy, przeszczep rogówki, witrektomia)
- Operacyjnej tamponadzie siatkówki

SPOSÓB UŻYCIA:

-
1. Przed zastosowaniem kropli zaleca się dokładnie umyć ręce.
 2. Po zdjęciu zakrętki unikać dotykania końcówki zakraplacza.
 3. Trzymać obróconą otwartą butelkę pionowo nad okiem.
 4. Lekko nacisnąć butelkę i podać po jednej kropli do oka zwierzęcia.
 5. Podczas stosowania unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem i rzęsami.
 6. Po zastosowaniu zamknąć butelkę zakrętką.